

HIVENAINE- JA ALTISTETUTKIMUSTEN NÄYTEASTIAT JA KULJETUSPUTKET

Tutkimusten muut tiedot, kuten ohjeet näytteenoton ajoittamisesta sekä näytteiden säilytys- ja lähetysohjeet, tulee aina lukea laboratoriokäsikirjastamme.




Kokoverestä tehtävät tutkimukset:

| Nro | Lyhenne | Näytteenottoputki |
|-------|-----------|--|
| 2636 | B -Zn | BD Vacutainer K2EDTA, REF 368381  |
| 2147 | B -Cr | |
| 6164 | B -Co | |
| 1314 | B -Hg | |
| 1988 | B -Cd | |
| 2271 | B -Pb | |
| 3748 | B -Mn | |
| 9380 | B -CrCo | |
| 23044 | B -CrCoTi | |


Plasmasta tehtävät tutkimukset:

| Nro | Lyhenne | Näytteenottoputki | Erotteluputki |
|----------------|---------|---|--|
| 4564 | P -Se | BD Vacutainer K2EDTA, REF 368381  | Vacuette Z No Additive, REF 454001  |
| 9417, 11151 | P -I | | |

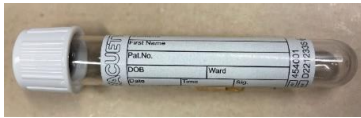



Seerumista tehtävä tutkimus:

| Nro | Lyhenne | Näytteenottoputki | Erotteluputki | Huomioitavaa |
|----------------|---------|---|--|---|
| 11088 | S -Zn | Seerumigeeliputki esim. BD Vacutainer REF 367957 tai Vacuette REF 454078 | Vacuette Z No Additive, REF 454001  | Seerumi on eroteltava geelin päältä heti sentrifugoinnin jälkeen. |
| 2170 | S -Cu | | | |
| 2998, 10015 | S -Al | Vacuette Z No Additive, REF 454001  | Vacuette Z No Additive, REF 454001  | Yksilöllinen hyytymisaika, erottelu 4h kuluessa. Seerumi kaadetaan erotteluputkeen. |

Vuorokausivirtsasta tehtävät tutkimukset:

| Nro | Lyhenne | Näyteastia | Kuljetusputki | Huomioitavaa |
|------|---------|--|--|---|
| 2169 | dU-Cu | Tehdaspuhdas keräysastia | Vacuette Z No Additive, REF 454001  | Näyte siirretään kaatamalla kuljetusputkeen |
| 2637 | dU-Zn | Tehdaspuhdas keräysastia. Astiassa tai sen korkissa ei saa olla kumista valmistettuja osia (esim. korkintiiviste). | | |

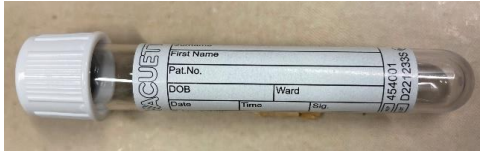Virtsasta tehtävät tutkimukset:

| Nro | Lyhenne | Näytteenottoastia | Kuljetusputki | Huomioitavaa |
|------|------------|---------------------------|---|---|
| 1316 | U -Hg | Tehdaspuhdas muovipurkki. | Vacuette Z No Additive, REF 454001  | Näyte siirretään kaatamalla kuljetusputkeen |
| 1984 | U -I | | | |
| 1989 | U -Cd | | | |
| 2149 | U -Cr | | | |
| 2171 | U -Cu | | | |
| 2274 | U -Pb | | | |
| 2323 | U -Mn | | | |
| 2397 | U -Ni | | | |
| 3456 | U -Co | | | |
| 3921 | U -Al | | | |
| 1761 | U -MaPGa | Tehdaspuhdas muovipurkki. | Säilöntäaineeton kuljetusputki (biomonitorointi):  | Näyte siirretään välittömästi kaatamalla kuljetusputkeen. Lähetä näytteen mukana täytetty esitietolomake . |
| 1776 | U -Pyr | | | |
| 3977 | U -Naftol | | | |
| 1777 | U -Zn | | | |
| 1734 | U -As-I | | | |
| 3229 | U -Methipp | | | |
| 1766 | U -MDA | Tehdaspuhdas muovipurkki. | Säilöntäainetta (sitruunahappo) sisältävä kuljetusputki:  | |
| 9459 | U -MeOH | Tehdaspuhdas muovipurkki. | Teflonkorkkinen lasiputki:  | |