

Arvoisa asiakas,

**Reagenssi- ja viitearvomuutos****Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet****S -MypnAb KL 2367**

## Osatutkimukset

S -MypnAbG KL 4150

S -MypnAbM KL 4151

Tutkimuksessa käytettävät reagenssit vaihtuvat ja samalla S -MypnAbG -tutkimuksen viitearvo muuttuu. Muutos vaikuttaa myös S -YskäT (ATK 631) tutkimukseen, jonka osatutkimuksena ovat S -MypnAbG ja S -MypnAbM.

**Uudet viitearvot:**

S -MypnAbG alle 16 RU/ml

S -MypnAbM negatiivinen

Tuloksista annetaan aina lausunto.

**Näyte:**

1 ml seerumia, EDTA-, hepariini- tai sitraattiplasmaa.

Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Parinäyte yleensä 10 - 14 vrk:n sisällä.

Kahden kuukauden sisällä tullut parinäyte tutkitaan rinnakkain ensimmäisen näytteen kanssa. Parinäyte tulee merkitä putkeen II-näyte merkinnällä.

**Säilytys ja lähetys:**

Säilytys 14 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 15.2.2017 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

kemisti Tea Lamberg

puh. 043 825 9316

tea.lamberg@medix.fi