

Asiakastiedote

36/2021

17.8.2021

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

Uusi tutkimus ulosteen veren havaitsemiseen

Hemoglobiini, ihmisen (kvant)

F -hHb, KL 6455

Tiedote koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä

Otamme käyttöön kvantitatiivisen ulosteen veren tutkimuksen F -hHb, KL 6455. Valikoimasta tulee poistumaan 31.12.2021 kvalitatiivinen tutkimus F -hHb-O, KL 3813.

Uudet iFOB-näyteastiat ovat tilattavissa 13.9.2021 alkaen ja niihin otettuja näytteitä voi toimittaa analysoitavaksi heti. Vanhat Actimin näyteastiat eivät ole enää tilattavissa 13.9.2021 alkaen, mutta niihin otettuja näytteitä analysoidaan 31.12.2021 asti, joten toivomme teidän käyttävän oman varastonne loppuun ennen uuteen tutkimukseen ja uusiin näyteastioihin siirtymistä.

Actimin putkeen otetulle näytteelle oikea pyyntö on F -hHb-O, KL 3813 ja uuteen iFOB näyteastiaan otetulle F -hHb, KL 6455. Laboratorio korjaa mahdollisesti väärin tulleen pyynnön.

Uusi näyteastia

iFOB näyteastia, tuotenumero 151052

Näytteen säilytys

Suosittelimme näytteen säilytystä jääkaapissa. Näyte säilyy enintään 5 vrk huoneenlämmössä (18-22°C) ja 7 vrk jääkaapissa (2-8°C).

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä

Menetelmä

Immunoturbidometrinen, akkreditoitu

Viitearvot

<15 µg/g

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna

Asiakastiedote

36/2021

17.8.2021

Sivu 2(2)

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

järjestelmäasiantuntija Maria Leppänen

p. 043 825 9315

maria.leppanen@synlab.fi

Hintatiedustelut:

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila

p. 050 409 0864

anne.knaapila@synlab.fi