

Asiakastiedote

27/2022

18.3.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Uusi pakettitutkimus, FIB-4 indeksi maksafibroosin ja -kirroosin arviointiin

Fibrosis-4 indeksi

Pt-FIB-4 ATK 10504

Osatutkimukset: B -Trom (KL 2791), S -ASAT (KL 1128), S -ALAT (KL 1026)

Muutos koskee Kivihakaan ja Tallinnaan lähetettäviä näytteitä

FIB-4 on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä ei alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) yhteydessä.

Laskukaava: $FIB4 = (ikä \times ASAT) / (B -Trom \times \text{neliöjuuri } ALAT)$. FIB-4 -indeksin kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy. FIB-4 on kehitetty ja validoitu 35-65 -vuotiaille, joten tuloksiin vanhemmille tai nuoremmille tulee suhtautua varovaisuudella.

Näytteet ja lähetys: Tutkimukseen tarvitaan EDTA-kokoverinäyte sekä seeruminäyte. Näytteet yhdistetään esimerkiksi kumilenkillä ja suljetaan muista näytteistä erilliseen pieneen minigrip-pussiin. Pussin päälle kirjoitetaan FIB-4. Näytteet suositellaan lähetettäväksi mahdollisimman pian, koska B -Trom säilyy analyysikelpoisena vain 2 päivää. Lähetys kylmässä (+4 - +8 °C). Näytteet on suojattava jäätymiseltä.

Tekotiheys: Tutkimus tehdään päivittäin.

Viitearvo: Aikuiset, (yli 35-vuotiaat) alle 2,67

Uusi tutkimus on saatavana 10.3.2022 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

IT-yhteydet

järjestelmäasiantuntija Maria Leppänen
puh. 043 825 9315
maria.leppanen@synlab.fi

Hintatiedustelut:

myynti@synlab.fi