

## Asiakastiedote

35/2022

1.4.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### Näytteen käsittelyohje muuttuu

Alumiini, plasmasta

P -AI KL 2998

### Näytteiden säilyvyysohje muuttuu

Alumiini, plasmasta

P -AI KL 2998

Alumiini, virtsasta

U -AI KL 3921

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Muutamme alumiinin plasmanäytteen käsittelyohjetta. **Jatkossa plasmaa ei saa erotella, vaan näyte lähetetään kokoverenä keskuslaboratorioomme.** Alihankintalaboratoriomme suorittaa jatkossa näytteen sentrifugoinnin ja erottelun. Alumiininäyte on erittäin herkkä kontaminaatiolle ja näin pyrimme vähentämään kontaminaatoriskiä.

Samalla päivitämme virtsa- ja plasmanäytteen (kokoverinäytteen) säilyvyysohjeen.

**Plasmanäyte** Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseinin tarkoitettuja hepariiniputkia.

Ennen varsinaista verinäytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuu. Näyte otetaan edellä mainittuun 7 ml erikoisputkeen. Näyte lähetetään kokoverenä.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Muutos tulee voimaan 5.4.2022.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi