

Asiakastiedote

28/2023

03.05.2023

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

Menetelmämuutos**Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat, seerumin**

S -IgLc-V KL 4949

Osatutkimukset

S -IgLcK-V KL 4966

S -IgLcL-V KL 4950

S -K/L-s-V ATK 9726

Tiedote koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on päivittänyt tutkimuksen S -IgLc-V määrittämenetelmää, jonka johdosta viitearvot muuttuvat.

Käyttöön otettavat viitevälit ovat valmistajan ilmoittamia ja pohjautuvat 369:n oletetusti terveen aikuishenkilön muodostamaan viiteaineistoon. Alihankintalaboratorion tekemässä menetelmävertailussa saatujen tulosten tulkinnallinen yhteneväisyys uuden ja vanhan menetelmän välillä on vapaan kappaletjun osalta 88 %, vapaan lambda ketjun osalta 92 % ja suhteen osalta 83 %.

Yksittäisillä potilailla menetelmien välillä havaitaan erittäin merkittäviä tasomuutoksia. Myös yleisestä muutoksen suunnasta poikkeavia tasoeroja esiintyy. Tämän vuoksi viimeisen vuoden aikana seurannassa olleiden potilaiden uudet näytteet analysoidaan ja raportoidaan muutoksen jälkeen kolmen (3) kuukauden ajan rinnakkain sekä uudella että vanhalla menetelmällä.

Menetelmä Immunonefelometria**Viitearvot**

Osatutkimus	Poistuvat viitearvot	Uudet viitearvot	Keskimääräinen tasomuutos viitevälin läheisyydessä
S -IgLcK-V	3.3 – 19.4 mg/l	6.7 – 22.4 mg/l	- 20 %
S -IgLcL-V	5.7 – 26.3 mg/l	8.3 – 27.0 mg/l	+ 10 %
S -K/L-s-V	0.26 – 1.65 suhde	0.31 – 1.56 suhde	- 25 %

Muutos astuu voimaan heti.

Asiakastiedote

28/2023

03.05.2023

Sivu 2(2)

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi