

Asiakastiedote

32/2023

16.05.2023

Sivu 1(3)

Hyvä asiakas,

Muutos näytemäärään, näytteen käsittelyyn ja vastausviiveeseen

Kryoglobuliini

S -Kryog KL 3656

Kryopresipitaatin analyysi

S -Kryopre KL 2159

Tiedote koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Seerumin määrä ja inkubaatioaika vaikuttavat kryoglobuliini ja kryopresipitaation analyysitutkimusten herkkyysiin. Herkkyyden parantamiseksi näihin tutkimuksiin vaaditaan jatkossa nykyistä suurempi näytemäärä eli 8 ml seerumia. Samalla myös inkubaatioaikaa pidennetään, minkä vuoksi vastausaika pitenee.

Näyteastia

Seerumiputki 2 x 10 ml. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näyte

8 ml seerumia. Putken pitää olla esilämmitetty. Kokoveri on säilytettävä +37 °C:ssa, kunnes seerumi on eroteltu. Seerumi erotellaan lämpimänä. Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen seerumin erottelua, ei tutkimusta voida tehdä. Kokoverenä saapuvat näytteet hylätään.

Säilytys ja lähetys

Näytteen tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Lämpimänä eroteltu seerumi säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte on suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

Vastausaika (arkipäivää)

8-15

Asiakastiedote

32/2023

16.05.2023

Sivu 2(3)

Muutos näytemäärään, näytteen käsittelyyn ja vastausviiveeseen

Autoimmuunitutkimus, laaja

Pt-AIT-L ATK 643
 STT koodi: 9109

Osatutkimukset

S -ANA KL 2819
E -Coombm KL 1214
S -KardAbG KL 2173
S -Kryog KL 3656
S -Kyhemag KL 2173
S -RF KL 3550
S -TPOAb KL 4028

Näyteastia

Seerumiputki 2 x 10 ml. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.
EDTA-putki (K2)

Näyte

8 ml seerumia sekä 3 ml EDTA-verta.

Seerumiputken pitää olla esilämmitetty. Kokoveri on säilytettävä +37 °C:ssa, kunnes seerumi on eroteltu. Seerumi erotellaan lämpimänä. Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen seerumin erottelua, ei tutkimusta voida tehdä. Kokoverenä saapuvat seeruminäytteet hylätään.

Säilytys ja lähetys

Lämpimänä eroteltu seerumi säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte on suojattava kylmältä kuljetuksen aikana.

EDTA -veren säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Näytteiden tulee olla perillä laboratoriossamme viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteitä ei oteta vastaan viikonloppuna eikä juhlapyhinä.

Vastausaika (arkipäivää)

8-15

Asiakastiedote

32/2023

16.05.2023

Sivu 3(3)

Muutos näytteen käsittelyyn

Kylmähemagglutiniinit S -Kyhemag KL 2173

Näyteastia	Seerumiputki. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.
Näyte	0,5 ml lämpimänä eroteltua seerumia. Verinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä. Kokoverenä saapuvat näytteet hylätään.
Säilytys ja lähetys	Lämpimänä eroteltua seerumia voidaan säilyttää jääkaapissa tai huoneenlämmössä muutamia päiviä. Lähetys huoneenlämmössä.

Muutokset koskevat 19.5.2023 alkaen saapuvia näytteitä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi