

Asiakastiedote 8/2024

31.1.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Viitearvo- ja näyteohjeistusmuutos**Sitraatti, vuorokausivirtsasta****dU-Sitraat KL 4166****Sitraatti****U -Sitraat ATK 10864**

Päivitämme tutkimuksen dU-Sitraat viitearvot vastaamaan alihankintalaboratorion ilmoittamia viitearvoja. Viitearvot perustuvat kirjallisuuteen. Päivitämme samalla myös näyteohjeistusta. Vuorokausivirtsan keräys voidaan jatkossa toteuttaa ilman säilöntäainetta. Myöskään kertavirtsanäytteisiin (U -Sitraat) ei tarvitse lisätä säilöntäainetta. Tutkimusten muut tiedot säilyvät ennallaan.

Näyte

dU-Sitraat: 2–3 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Virtsa säilytetään jääkaapissa keräyksen ajan. Virtsamäärä mitataan ja ilmoitetaan pyynnön yhteydessä.

U -Sitraat: 2-3 ml kertavirtsaa

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetystenä. Pidempiaikainen (maks. 14 vrk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

**Viitearvot
dU-Sitraat**

Uudet viitearvot 4.4.2024 alkaen		Poistuvat viitearvot
pojat < 18 v	>365 mg/1,73 m ² /vrk	382 – 764 mg/vrk
tytöt < 18 v	>310 mg/1,73 m ² /vrk	
aikuiset ≥ 18 v	>326 mg/vrk	

Kirjallisuusviite

Seitz C., Bach T., Bader M., Berg W., Knoll T., Neisius A., Netsch C., Schönthaler M., Siener R., Stein R., Straub M., Strohmaier W. & Türk C. (2019). *S2k-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe der Urolithiasis (AWMF Registernummer 043 - 025) Aktualisierung 2018*. Arbeitskreis Harnsteine der Akademie der Deutschen Urologen. Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU).

Muutokset astuvat voimaan 4.4.2024 alkaen. Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi