

Asiakastiedote**17/2024****28.2.2024**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Uusi näyteastia**Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet**

Li -Alzheim ATK 9490

Osatutkimukset

Li -BAm42 KL 4811

Li -BAm40 ATK 10388

Li -BA42/40 ATK 10389

Li -Tau KL 4810

Li -FosTau KL 4809

Olemme ottaneet käyttöön uuden näyteastian Li-Alzheim tutkimukselle. Putki on tilattavissa SYNLAB:in tarviketilauslomakkeella.

Näytteeksi otetaan 2,5 ml selkäydinnestettä suoraan näyteputkeen. Näytteenotossa ensimmäistä 2 ml likvoria ei suositella otettavaksi Li-Alzheim tutkimukseen. Näytettä ei saa sentrifugoida, pipetoida tai siirtää putkesta toiseen, sillä tämä saattaa johtaa virheellisen mataliin tuloksiin. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa lähetyksen aikana.

Uusi näyteastiaLi-Alzheim näytteenottoputki, Sarstedt
(art. no.: 63.614.625)

Suosittellemme ottamaan uuden putken käyttöön heti, mutta tarvittaessa aiemmin käytössä olleeseen polypropyleeniputkeen otetut näytteet hyväksytään vielä tekoon maaliskuun loppuun asti. Huhtikuusta lähtien hyväksymme näytteet vain Sarstedt:n putkissa.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi