

Asiakastiedote

42/2024

3.6.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Virtsakeräyksen ohjeistus muuttuu

Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta
dU-Pi KL 1429

Kalsium, vuorokausivirtsasta
dU-Ca KL 2011

Muutamme kalsiumin ja epäorgaanisen fosfaatin vuorokausivirtsan keräysohjetta reagenssitoimittajan suosituksen mukaiseksi. Jatkossa vuorokausivirtsan keräysastiaan on lisättävä säilöntäaine kalsiumsuolojen ja fosfaattikompleksien saostumisen estämiseksi.

Säilöntäaineena käytetään 10 ml 6 M HCl (suolahappoa), joka lisätään kahdessa erässä: 5 ml keräyksen alkaessa ensimmäisen virtsaerän jälkeen ja toiset 5 ml keräyksen lopussa. Jos joudutaan jatkamaan toiseen keräysastiaan, lisätään toinen 5 ml säilöntäainetta siihen. Jos virtsaa erittyy hyvin vähän (alle 1 dl), toista säilöntäainelisäystä ei tehdä. Säilöntäaineen tarkoituksena on pitää virtsan pH happamana ($\text{pH} < 3$).

Ohjeistus on päivitetty myös laboriokäsikirjasta löytyvään [vuorokausivirtsan keräysohjeeseen](#).

Muutokset tulevat voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi