

Asiakastiedote

61/2024

21.8.2024

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Muutoksia tutkimusten tiedoissa

Päivitämme seuraavien tutkimusten tietoja. Muutoksia tulee näytteiden käsittelyyn sekä säilytykseen ja lähetykseen.

Tutkimuslyhenne	KL-numero	
Muutos näytteen käsittelyyn		
P -Mitotan	6039	1 ml (minimi 0.5 ml) EDTA-plasmaa. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Näyte on sentrifugoitava ja eroteltava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, viimeistään 1 tunnin kuluessa näytteenotosta.
Muutos näytteen säilytykseen ja lähetykseen		
S -IL2R	4844	1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte tulee erotella ja siirtää jääkaappiin mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy yhden vuorokauden jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
P -IL6 P -IL8	4842 4843 STT koodi: 11189	1 ml (minimi 0.5 ml) EDTA-plasmaa. Näyte tulee erotella ja siirtää jääkaappiin mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen (30 minuutin kuluessa). Näyte säilyy yhden vuorokauden kylmässä. Lähetys kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Muutokset astuvat voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi