

Asiakastiedote 6/2025**3.2.2025**

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,**Uusi tutkimus tutkimusvalikoimaan****Trombosyytit, sitraattiveri****B -TromSit ATK 11100 (STT koodi 11349)**

Joillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa, mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla tällaisista henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa.

Jos PVK+T tai TVK näytteessä todetaan trombosyyttikasoja, suositellaan varmistamaan tulos B -TromSit-tutkimuksella.

Näyte

Kokoverinäyte Na-sitraattiputkessa, 2,7 ml tai 1,8 ml. Putki täytetään merkkiin asti.

Näyte suositellaan ottamaan 37 °C esilämmitettyyn näyteputkeen. Jos esilämmitys ei ole mahdollinen, voi näytteen ottaa myös huoneenlämpöiseen putkeen

Tarvittaessa B -TromSit (Na-sitraattiputki) näytteen lisäksi voidaan lähettää myös B -Trom (KL 2791) tai B -PVK+T (KL 2474) -näyte (EDTA-putki). Molemmille tarvitaan omat pyynnöt.

Aiemman käytännön mukaisesti EDTA-putken lisäksi on voinut lähettää sitraattiputken ilman pyyntöä. Tämä käytäntö ei jatkossa ole sallittua. Mikäli pyyntö puuttuu, sitraattiputkelle kirjataan pyyntö analysoivassa laboratoriossa.

Säilytys- ja lähetystiedot

Huoneenlämmössä. Lähetys mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Säilytystä tai lähetystä kylmässä ei suositella.

Viitearvo

Viitearvot ovat samat kuin B -Trom-tutkimuksella.

Tarkemmat tiedot tutkimuksesta löytyvät SYNLAB:n laboratoriokäsikirjasta 3.3.2025 alkaen

Pyydämme teitä olemaan hintatiedusteluissa yhteydessä myyntiimme ja tietohallintoomme uuden tutkimuksen testaamiseksi.

Asiakastiedote 6/2025

3.2.2025

Sivu 2(2)

Tutkimus on tilattavissa 3.3.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Hintatiedustelut

myynti@synlab.fi

Tietohallinto

tietohallinto@synlab.fi