

GARDNERELLA VAGINALIS, NUKLEIINIhapPO (-GavaNhO, 10095)

Naisella emätintulehdus, virtsavaivat sekä bakteerivaginoosi epäily

Näytteenottovälineet

- eSwab-näytteenottoasetti
- Nimitarra näytteenottoputkeen



Näytteenotto

Näytteenottoputken korkki avataan ja putki asetetaan tasaiselle alustalle, jotta sen sisältämä säilytysneste ei pääse valumaan pois. Näytteenottotikun nukkapäähän ei tule koskea sormilla.

Näytteenottotikku viedään emättimeen noin 5 cm syvyydelle ja pyöritetään noin 30 sekunnin ajan siten, että tikun nukkapää hankaa emättimen seinämää.

Näytteenoton jälkeen näytteenottotikku laitetaan nukkapää edellä näytteenottoputkeen. Näytteenottotikun ylimääräinen varsi taitetaan katkaisukohtasta, tikun näytteenottopää jätetään putkeen ja korkki suljetaan huolellisesti. Tarraan kirjoitetaan henkilötiedot, sekä päivämäärä ja se liimataan näytteenottoputkeen.

Säilytys ja kuljetus

Näyte toimitetaan laboratorioon samana päivänä näytteenoton jälkeen tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa (+2- +8°C).