

## ELASTAASI 1, ULOSTE

F -Elast1 (1718)

Haiman vajaatoiminnan selvittäminen

### Näytteenottovälineet

- Ulostepurkki, kuiva/kierrekorkillinen
- Kertakäyttöinen näyteastia
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

### Näytteenotto

- Ulostetaan kertakäyttöastiaan. Ulosteseen ei saa sekoittua virtsaa. Siirretään ulostetta purkin kannessa kiinni olevalla lastalla heti ulostamisen jälkeen purkkiin noin teelusikallisen verran. Vetinen näyte voi antaa virheellisen tuloksen. Purkki suljetaan huolellisesti ja purkin ulkopuolen tulee olla puhtas.
- Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra ulostepurkkiin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen ulostepurkki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

### Säilytys ja kuljetus

Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. Suositellaan kylmäkuljetusta. Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C).