

BAKTEERI, VILJELY, YSKÖS

Ex-BaktVi (3493)

Alempien hengitysteiden bakteeri-infektion aiheuttajan selvittely. Lähinnä näytteestä etsitään pneumokokkia, hemofilusta ja Moraxella catarrhalista.

Näytteenottovälineet

- Näytepurkki, kuiva, kierrekorkillinen
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

Näytteenotto

Tehokas ja syvä yskiminen on tärkeää, jotta tutkittavaa materiaalia on tarpeeksi. Ekspektorantti-yskänlääkkeet auttavat saamaan edustavan näytteen.

- Suu ja nielu huuhdellaan vedellä ennen yskimistä. Aamuyskös yskitään suoraan avattuun purkkiin. Yskösmateriaalia tulee olla runsaasti. Pelkkä sylki tai nenänielun erite eivät kelpaa tutkittavaksi.
- Näytepurkki suljetaan huolellisesti.
- Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra näytepurkkeihin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen näytepurkki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyte säilytetään näytteenoton jälkeen jääkapissa (2-8°C). Näyte tuodaan laboratorioon kylmäkuljetuksena mahdollisimman pian näytteenottopäivänä.