

KALPROTEKIINI, ULOSTE

F -Calpro (4803)

Tulehduksellisten suolistosairauksien seulonta, taudin aktiivisuuden arviointi ja hoidon tehon seuranta.

Näytteenottovälineet

- Ulostepurkki, kuiva/kierrekorkillinen
- Kertakäyttöinen näyteastia
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)

Näytteenotto

- Ulostetaan kertakäyttöastiaan. Ulosteseen ei saa sekoittua virtsaa. Siirretään ulostetta purkin kannessa kiinni olevalla lastalla heti ulostamisen jälkeen purkkiin vähintään ruokalusikallisen verran, enintään puolet näytepurkin tilavuudesta. Purkki suljetaan huolellisesti ja purkin ulkopuolen on oltava puhdas.
- Kiinnitetään laboratorion saatu valmis tai itse täytetty nimitarra ulostepurkkiin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen ulostepurkki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C).