

CHLAMYDIA TRACHOMATIS OCH NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEINISYRA, URIN U-CtGcNhO (4816)

Misstanke om Chlamydia trachomatis-infektion och uteslutning av gonorré. Screening av asymptomatiska bärare.

Provtagningsmaterial

- Aptima Urine Specimen-provrör
- Engångspipett
- Provtagningsburk för engångsbruk
- Namnetiketter för provrören
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)



Provtagning

Urinprovet tas när det gått minst 2 timmar sedan föregående urinering. Ingen underlivsvätt. Urin kastas i provtagningsburken vid laboratoriet börjande från den första droppen ända tills markeringen på burken är nådd (20-30 ml). För mycket urin minskar undersökningens noggrannhet. Överlopps urin kastas i toalettstolen.

Överföring av provet till provröret

Aptima Urine Specimen-provröret innehåller vätska som inte får kastas bort. Cirka 2 ml urin överförs med pipett till provröret så att vätskans yta är mellan de två svarta markeringarna (= "fönster"). Provrörets kork försluts omsorgsfullt.

Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provröret. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum. Etiketten får inte täcka "fönstret" i provröret.

Efter provtagningen placeras provröret i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

Förvaring och transport

Provet levereras till laboratoriet samma dag efter provtagningen eller senast följande vardag. Provet förvaras och transporteras i rumstemperatur (2 - 30°C)

