

## HELICOBACTER PYLORI, ANTIGEN, AVFÖRING

F –HepyAg (3952)

För att påvisa förekomsten av Helicobacter pylori-infektion och uppföljning av helicobacter avhysningsbehandling.

### Provtagningsmaterial

- Avföringsburk, torr/med skruvlock
- Provtagningskärl för engångsbruk
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)

### Förberedelser inför provtagning

Vissa läkemedel bör undvikas före blodprovet. **Om avbrytandet av medicineringen konsulteras alltid en läkare.**

#### Läkemedel som inte får tas ett dygn (1) före undersökningen

- Magsyrehämmande läkemedel: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm
- Läkemedel som inverkar på tarmens motilitet: Constella, Gaspid, MCP-Ratiopharm, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, Primperan, Resolor, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma
- Antasider: Balancid Novum, Magnesiummaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip
- Läkemedel som skyddar slemhinnan: Antepsin, Galieve, Gaviscon

#### Läkemedel som inte får tas två (2) veckor före undersökningen

- Antibiotikakurer
- Protonpumpshämmare: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.

#### Läkemedel som inte får tas fyra (4) veckor före undersökningen

- Behandling för avhysning av helicobacter: Helipak A, Helipak K

### Provtagning

- Tarmen töms i engångskärlet. Urin får inte blandas med avföringen. Ungefär en tesked avföring överförs genast efter tömning av tarmen med hjälp av spateln som är fäst vid locket. Ett diarréprov som är vattnigt passar inte som prov. Burken tillsluts omsorgsfullt. Utsidan av burken ska vara ren. Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på avföringsburken. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras avföringsburken i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Provtagningsburken ska levereras till laboratoriet snarast möjligt, helst redan under provtagningsdagen. Provets hållbarhetstid i kylskåp (2-8°C) är 3 dygn.