

## IRTOSOLUTUTKIMUS, SPUTUM

Ex-Syto (4080)

Diagnos av inflammation och tumörer i luftvägarna.

### Provtagningsmaterial

- Provtagningsburk med 50–70 % alkohol som fixativ, 3 st.
- Namnetiketter, 3 st.
- Plastpåse (t.ex. Minigrip)

### Provtagning

Provet tas under tre efterföljande dagar, genast på morgonen före morgonmålet i tre separata provtagningsburkar. En effektiv och djup hostning är viktig för att det skall finnas tillräckligt med material för undersökningen. Slemlösande hostmedicin hjälper till för att få ett bra upphostningsprov.

- Morgonupphostning hostas direkt in i öppnad burk. Det bör finnas rikligt med upphostningsmaterial. Spott eller utsöndring från näs och svalg duger inte som provmaterial.
- Provtagningsburken försluts omsorgsfullt och provet blandas med alkoholen.
- Namnetikett från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provtagningsburkarna. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras provtagningsburkarna i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Alla tre prover kan levereras samtidigt till laboratoriet. Proven förvaras i kylskåp efter provtagningen (2-8°C).

Proven transporteras till laboratoriet vid rumstemperatur.