

SALMONELLA, VILJELY, ULOSTE

F -SalmVi (2608)

Elintarvike- tai muun työntekijän terveystarkastukset, todetun salmonellakantajuuden seuranta sekä epidemiologiset selvitykset.

Näytteenottovälineet

- Bakteerikuljetusputki
- Kertakäyttöinen näyteastia
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip)



Näytteenotto

Bakteerikuljetusputket säilytetään huoneenlämmössä ennen näytteenottoa.

- Ulostetaan kertakäyttöastiaan tai WC-paperiin. Ulosteseen ei saa sekoittua virtsaa. Siirretään näyte välittömästi ulostamisen jälkeen bakteerikuljetusputkeen.
- Avataan bakteerikuljetusputken pakkaus. Taitetaan putkesta korkki pois katkoviivan kohdalta. Korkki heitetään roskiin.
- Pumpulitikku työnnetään ulosteeseen niin, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti.
- Työnnetään ulosteinen pumpulitikku kuljetusputken pohjaan saakka geelin sisälle. Pumpulitikussa kiinni oleva korkki sulkee putken.
- Kiinnitetään laboratorion saadut valmiit tai itse täytetyt nimitarrat kuljetusputkiin. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytteenoton jälkeen kuljetusputket pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Bakteerikuljetusputki säilytetään näytteenoton jälkeen jääkapissa (2-8°C) ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä mielellään samana, viimeistään seuraavan päivän aamuna.

Laboratoriolle ilmoitetaan mahdollinen ulkomaanmatkakohde.